



## Аннотация по применению средства дезинфицирующего с моющим эффектом

### «DGM Дезигард Глико»

(составлено на основании инструкции по применению №16-12-01/1618 от 01.03.2019г.)

Химический состав	
Гликолевая кислота	Не менее 15.00%
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид	Не менее 10.00%
ПАВ	
Ингибитор коррозии	
pH 10% рабочего раствора	1.5-3.5

Срок годности	
Средства	3 года
Рабочего раствора	15 суток

Антимикробная активность
Грам+ и грам- бактерии
Туберкулез (тест на M. Terraе)
Вирусы (тест на вирусе ранга "Г" по ФКР)
Грибы (кандида, плесень)
Споры

Приготовление рабочих растворов				
Концентрация раствора, %	Количество воды и средства для рабочего раствора объемом:			
	1л		10л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, мл
0.1	1.0	999.0	10.0	9990.0
0.25	2.5	997.5	25.0	9975.0
0.5	5.0	995.0	50.0	9950.0
1.0	10.0	990.0	100.0	9900.0
1.5	15.0	985.0	150.0	9850.0
2.0	20.0	980.0	200.0	9800.0
2.5	25.0	975.0	250.0	9750.0
3.0	30.0	970.0	300.0	9700.0
7.0	70.0	930.0	700.0	9300.0

**Режимы применения средства «DGM Дезигард Глико».**

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
<b>Основные режимы</b>				
Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткая мебель, предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов Проведение генеральных уборок	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	протираание
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
Спороцидный	7.0	30		
Фунгицидный (кандида)	1.0	30		
Фунгицидный (плесень)	3.0	60	протираание, орошение двукратная обработка	
Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.)	Вирулицидный	0.1	60	протираание, орошение обработка щеткой или ершом
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
Столовая посуда (в том числе одноразовая)	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	погружение (2л на 1 комплект)
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
Спороцидный	7.0	30		
Фунгицидный (кандида)	1.0	30		
Фунгицидный (плесень)	3.0	60		
Лабораторная посуда, предметы для мытья посуды	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	погружение (2л на 10 единиц)
		0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
Вирулицидный	1.0	10		
	1.5	5		

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
	Спороцидный	7.0	30	
	Фунгицидный (кандида)	1.0	30	
	Фунгицидный (плесень)	3.0	60	
Белье	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	замачивание (4л на 1 кг сухого белья)
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
	1.5	5		
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
Спороцидный	7.0	30		
Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые коврики	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	погружение, протирание, орошение (крупные игрушки)
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
	1.5	5		
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
Спороцидный	7.0	30		
Уборочный материал	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	погружение, протирание
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
	1.5	5		
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
Спороцидный	7.0	30		
Фунгицидный	1.0	30		

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
	(кандида)			
	Фунгицидный (плесень)	3.0	60	
Воздух в помещениях	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	распыление, аэрозолирование
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
	Спороцидный	7.0	30	
Фунгицидный (кандида)	1.0	30		
Фунгицидный (плесень)	3.0	60		
Системы вентиляции и кондиционирования	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	протираание, замачивание, погружение, орошение, аэрозолирование
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
	Спороцидный	7.0	30	
Фунгицидный (кандида)	1.0	30		
Фунгицидный (плесень)	3.0	60		
Кувезы	Вирулицидный	0.1	60	протираание
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
Приспособления к кувезам	Вирулицидный	0.1	60	погружение
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
Комплекующие детали наркозно-дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования,	Вирулицидный	0.1	60	протираание
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
датчиков узи				
Эндотрахеальные трубки, трахотомические канюли, ротоглоточные воздуховоды, лицевые маски, анестезиологические шланги	Вирулицидный	0.1 0.25 0.5 1.0 1.5	60 30 15 10 5	погружение
Объекты санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	Вирулицидный	0.1 0.25 0.5 1.0 1.5	60 30 15 10 5	протираание, орошение
Мусоропроводы, мусорные баки, мусоровозы	Вирулицидный	0.1 0.25 0.5 1.0 1.5	60 30 15 10 5	
<b>Режимы обработки отходов</b>				
Лабораторная посуда, загрязненная биологическими жидкостями		2.5 3.0	120 90	поружение (1:2) поружение (1:1)
Использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, белье однократного применения, медизделия однократного применения (в т.ч. ампулы, шприцы)	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	погружение
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
	Туберкулоцидный	1.0 2.0	60 30	
Спороцидный	7.0	30		
Фунгицидный (кандида)	1.0	30		
	Фунгицидный (плесень)	3.0	60	
Контейнеры для сбора и удаления медотходов	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1	30	протираание, орошение
	Вирулицидный	0.1	60	
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
	Туберкулоцидный	1.0	60	
		2.0	30	
	Спороцидный	7.0	30	
	Фунгицидный (кандида)	1.0	30	
	Фунгицидный (плесень)	3.0	60	
Остатки пищи		2.5	120	поружение (1:2) поружение (1:1)
		3.0	90	
Жидкие отходы, смывные воды, кровь, сыворотка, выделения больного		2.5	120	поружение (1:2) поружение (1:1)
		3.0	90	
Дезковрики	-	0.1	-	заливание
<b>Обработка медицинских изделий (МИ)</b>				
Обработка МИ (в т.ч. Эндоскопы), не совмещенная с ПСО	Бактерицидный (кроме туберкулеза), вирулицидный	0.1	60	замачивание
		0.25	30	
		0.5	15	
		1.0	10	
		1.5	5	
	Фунгицидный	1.0	30	
Туберкулоцидный	1.0	60		
	2.0	30		
ДВУ	7.0	30		
Стерилизация	7.0	30		
Обработка МИ (в т.ч. Эндоскопы), совмещенная с ПСО	Бактерицидный (кроме туберкулеза), вирулицидный	0.1 : 0.25 : 0.5 : 1.0 : 1.5	1-3 60 : 30 : 15 : 10 : 5 0.5-3 1-3	промывание замачивание мойка ополаскивание
			Фунгицидный	
	Туберкулоцидный	1.0 : 2.0	1-3 60 : 30 0.5-3 0.5-3	
Предстерилизационная очистка МИ (в т.ч. Эндоскопы)	-	0.25	10 0.5-5 1-5	замачивание мойка ополаскивание