



Аннотация по применению средства
дезинфицирующего
«DGM Дезигард Рапид»

(составлено на основании инструкции по применению №16-12-01/757 от 31.01.2019г.)

Химический состав	
Пропанол-1	29.60%
Пропанол-2	21.10%
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	до 1,02 %
Срок годности	5 лет

Антимикробная активность
Грам+ и грам- бактерии
Туберкулез (тест на M. Terrae)
Вирусы (тест на вирусе ранга "Г" по ФКР)
Грибы

Режимы применения средства «DGM Дезигард Рапид».

Объект обработки	Режим обеззараживания	Экспозиция, мин	Способ обработки
Основные режимы			
Поверхности в помещениях, мебель, предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов, медицинские изделия, кувезы, наркозно-дыхательная и ингаляционная аппаратура, датчики УЗИ	Бактерицидный (кроме туберкулеза), фунгицидный, вирулицидный	0.5	протираание, замачивание, погружение, орошение
	Туберкулоцидный	1	
Пищевые, медицинские отходы, биологические выделения		1	смешивание: 1 часть отходов к 5 частям средства